

Canpol babies (5/300) Bezdotykowy termometr na podczerwień EasyStart

Ostrzeżenia lub informacje na temat bezpieczeństwa

Jak w przypadku każdego termometru, odpowiednia technika pomiaru ma kluczowe znaczenie dla uzyskania dokładnego odczytu temperatury.

Termometru używaj wyłącznie w zakresie temperatur od 5°C do 40°C (41°F do 104°F) i przy wilgotności względnej od 15 do 93%.

Termometr przechowuj w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od -20°C do 70°C (od -4°F do 158°F) i przy wilgotności względnej od 15% do 93%.

Urządzenie nie wymaga kalibracji.

Urządzenie nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.

Przed użyciem sprawdź stan termometru. Nie używaj termometru, który jest uszkodzony.

Dodatkowe przeglądy przez osobę trzecią nie są wymagane.

Nie modyfikuj urządzenia.

Nie używaj urządzenia w pobliżu środków łatwopalnych.

Nie czyść oraz nie dokonuj konserwacji włączonego urządzenia.

Nie wystawiaj termometru na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Unikaj upuszczenia termometru. Jeśli upuścisz termometr i będziesz podejrzewał(-a), że mógł on zostać uszkodzony, natychmiast skontaktuj się z obsługą klienta.

Nie dotykaj soczewki.

Nie dotykaj powierzchni skóry pacjenta.

Nie rozkładaj urządzenia na części.

Zawsze przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa zwłaszcza, gdy termometr jest używany u dzieci, u osób niepełnosprawnych lub w ich pobliżu.

Termometr nie zastępuje konsultacji lekarskiej.

Termometr oraz pacjent przed dokonaniem pomiaru muszą przebywać przez minimum 30 minut w stałej temperaturze.

Jeśli wyświetlacz podświetli się na czerwono oraz na wyświetlaczu pojawi się odczyt w zakresie od 38.0°C (100.4°F) do 43°C (109.4°F), niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem.