

katarek

Roztwór soli
fizjologiczny

NaCl 0,9%

5 ml

- 🔹 Pielęgnacja noska
- 🔹 Inhalacja
- 🔹 Czyszczenie oczu
- 🔹 Przemywanie ran

Izotoniczny, sterylny roztwór chlorku sodu 0,9%
w jednorazowych ampułkach do higieny oczu, nosa, uszu,
przemywania ran oraz do inhalacji.

STERILE

A

Nie stosować do iniekcji. 

WSKAZANIA

Katarek fizjologiczny roztwór soli może być stosowany u niemowląt i dzieci starszych oraz u osób dorosłych w następujący sposób:

- do higieny nosa: poprzez zakraplanie albo przemywanie suchego lub zatkanego nosa,
- do higieny oczu: poprzez zakraplanie, przemywanie lub płukanie,
- do higieny uszu,
- do przemywania ran,
- do inhalacji podczas aerzoloterapii.

POSTAĆ

- Opakowanie zawiera 10 lub 20 jednorazowych ampułek po 5 ml.

SKŁAD

Chlorek sodu 0,9 g
Woda oczyszczona q.s. 100 ml
Nie zawiera substancji konserwujących.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem dokładnie umyć ręce. Oderwać jedną ampułkę i otworzyć ją przekręcając jej górną część.

DO HIGIENY NOSA I OCZU

- Środek może być stosowany codziennie do higieny nosa i oczu, w ilości od 1 do 6 przemyć dziennie, w zależności od potrzeb.

HIGIENA NOSA

- Do zakraplania lub przemywania suchego lub zatkanego nosa.
- Należy przechylić głowę na bok.
- Delikatnie umieścić końcówkę w dziurce nosa i nacisnąć lekko ampułkę. Czynność powtórzyć w drugiej dziurce.
- Podnieść z powrotem głowę, aby umożliwić wypłynięcie śluzu, następnie wytrzeć nadmiar płynu. Przez 10 min. po zastosowaniu środka nie wydmuchiwać mocno nosa.
- W przypadku niemowląt podawać środek, wywierając jak najmniejszy nacisk na ampułkę, aby uniknąć zanieczyszczenia ucha środkowego.

HIGIENA OCZU

- Do zakraplania, przemywania lub płukania.
- Podać kilka kropli środka do każdego oka. Wytrzeć nadmiar płynu przy pomocy jałowego gazika.
- Unikać kontaktu ampułki z powierzchnią oka.
- W przypadku stosowania innego produktu do oczu, najpierw zastosować Katarek fizjologiczny roztwór soli, a następnie odczekać 15 min. przed podaniem kolejnego środka.
- Środek może być stosowany u osób noszących szkła kontaktowe.

katarek

Roztwór soli
fizjologiczny

NaCl 0,9%

5 ml

- 🔹 Pielęgnacja noska
- 🔹 Inhalacja
- 🔹 Czyszczenie oczu
- 🔹 Przemywanie ran

SPOSÓB UŻYCIA

DO HIGIENY USZU

- Do płukania. W celu zapewnienia doskonałej higieny uszu, po użyciu środka powierzchniowo czynnego do uszu, zastosować produkt do usunięcia pozostałości woskowiny oraz przepłukania zewnętrznego przewodu słuchowego.
- Zawartość jednej ampułki można wykorzystać do 2 uszu.
- Wyrzeć nadmiar płynu przy pomocy gazika

DO PRZEMYWANIA RAN

- Przepłukać ranę, używając zawartość całej ampułki.
- Wyrzeć nadmiar płynu jedynie na zdrowej skórze.
- Unikać kontaktu ampułki z powierzchnią rany.

DO INHALACJI PODCZAS AEROZOLOTERAPII

- Jeśli podczas aerozoloterapii środek ma być częścią roztworu przygotowanego do inhalacji, należy zapoznać się z instrukcjami podanymi na produkcie do inhalacji.
- Jeśli środek stosuje się samodzielnie, należy zapoznać się z instrukcjami podanymi na urządzeniu do aerozoloterapii.
- Przy pierwszym stosowaniu lub w przypadku nadwrażliwości układu oddechowego należy zasięgnąć porady lekarza.

OSTRZEŻENIA

- Do użytku jednorazowego i indywidualnego.
- Zawartość zużyć od razu po otwarciu. Po użyciu ampułkę należy wyrzucić.
- Nie używać tej samej ampułki do różnych zastosowań.
- Nie używać do iniekcji.
- Nie używać po upływie daty ważności.
- Nie używać w przypadku uszkodzenia ampułki.
- Chronić przed dziećmi.

Po napoczęciu ampułki nie można wykorzystać jej zawartości powtórnie – środek nie zawiera substancji konserwujących, w związku z czym powtórne użycie mogłoby grozić podaniem środka zanieczyszczonego.

Katerek fizjologiczny roztwór soli to sterylny wyrób medyczny klasy IIa.



PRODUCENT:
Laboratoire UNITHER
151, Rue André Durouchez
ESPACE INDUSTRIEL NORD
CS 28028
80084 AMIENS Cedex 2
FRANCJA



DYSTRYBUTOR:
DUNA Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 13/1
30-701 Kraków

Data oznakowania CE:
16.09.2016
Wersja instrukcji stosowania:
09/2017

Wyprodukowano we Francji.



www.katerek.pl