

*"To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą"*

Produkt spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy Rady 93/42/  
EWG z 14 czerwca 1993 w sprawie wyrobów medycznych

### **WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA**

Laktator elektryczny Lansinoh® 2 w 1 jest urządzeniem przeznaczonym do użytku osobistego i ze względów sanitarnych matki nigdy nie powinny korzystać z niego wspólnie, ani też go odsprzedawać.

Złamanie którejkolwiek z tych zasad spowoduje unieważnienie gwarancji.

Jeżeli jesteś nosicielką wirusowego zapalenia wątroby lub wirusa HIV, odciągnięcie pokarmu nie

zmniejszy ryzyka przekazania wirusa dziecku za pośrednictwem pokarmu.

Przed użyciem laktatora przeczytaj całą instrukcję

### **Niebezpieczeństwo**

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:

- Urządzenie zawsze odłączać od prądu zaraz po użyciu
- Nie korzystać z niego w trakcie kąpieli
- Nie trzymać urządzenia w miejscu, z którego może spaść lub zostać ściągnięte do wanny czy zlewu
- Laktatora nie wkładać ani nie wrzucać do wody czy do innej cieczy
- W przypadku, gdy urządzenie elektryczne wpadnie do wody, nie wyjmować go.

Natychmiast

odłączyć je od prądu

### **Ostrzeżenie**

Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń, porażenia prądem, ognia lub urazów osobistych:

- Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do prądu
- Zachować szczególne środki ostrożności w przypadku korzystania z urządzenia w obecności dzieci

lub osób niepełnosprawnych

- Z urządzenia korzystać jedynie w sposób opisany w tej instrukcji. Nie stosować dodatkowych

przyrządów, które nie zostały zalecone przez producenta

- Nigdy nie korzystać z tego urządzenia w przypadku, gdy kabel lub wtyczka nie działają odpowiednio

lub są uszkodzone, zostały upuszczone, uszkodzone lub wrzucone do wody

- Nie używać laktatora w przypadku, gdy w przewodach widoczna jest ciecz lub wilgoć.

Jeżeli wilgoć

jest widoczna, przed użyciem laktatora starannie ją wytrzeć

- Kabel trzymać z dala od ogrzewanych powierzchni
- Nigdy nie korzystaj z urządzenia w trakcie snu lub jeżeli jesteś śpiąca
- Nigdy nie wrzucać ani nie wkładać przedmiotów w jakikolwiek otwór lub przewody

- Nie korzystać z urządzenia, jeżeli jest uszkodzone lub brakuje jakichkolwiek części
- Nie pozwalać, aby małe dzieci lub zwierzęta domowe bawiły się laktatorem, zasilaczem sieciowym itp.

91

- Nie korzystać z urządzenia z zasilaczem sieciowym poza domem, nie włączać go w miejscu, w

którym używane są produkty z aerozolem lub podawany jest tlen

Instrukcje te należy zachować wraz z dowodem zakupu na przyszłość.

## **WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z ELEKTRYCZNEGO LAKTATORA LANSINOH® 2 W 1**

Nie czyścić ani nie sterylizować przewodów czy złącza do przewodów.

W celu zapewnienia maksymalnego przepływu mleka należy stosować się do instrukcji.

### **GWARANCJA**

Niniejszy produkt jest objęty gwarancją względem pierwotnego nabywcy - konsumenta („nabywca”)

i jest wolny od niedopuszczalnych w handlu wad materiałowych i produkcyjnych, na okres jednego

roku od daty zakupu na mechanizm laktatora oraz na okres 90 dni na pozostałe elementy. Niniejsza

gwarancja wygasa w przypadku sprzedaży lub przekazania tego produktu innej osobie.

Niniejsza

gwarancja daje użytkownikowi konkretne prawa, ale w zależności od lokalizacji

użytkownikowi mogą

przysługiwać również inne prawa.